

Monteringsanvisning Svankstöd luft



Montering av svankstöd luft




Svankstödsblåsan finns i olika storlekar för att passa alla storlekar på ryggstöd. Slangen är placerad förskjuten från centrum för att möjliggöra att slangen får en mjuk böj.



Dragkedjan är försedd med dubbla dragskor för att möjliggöra placering av pumpblåsan på båda sidor av ryggstödet.



Öppna upp dragkedjan helt med dragskorna åt vardera hållet, drag av klädseln upp över bålstöden för att minska trycket på skummet.

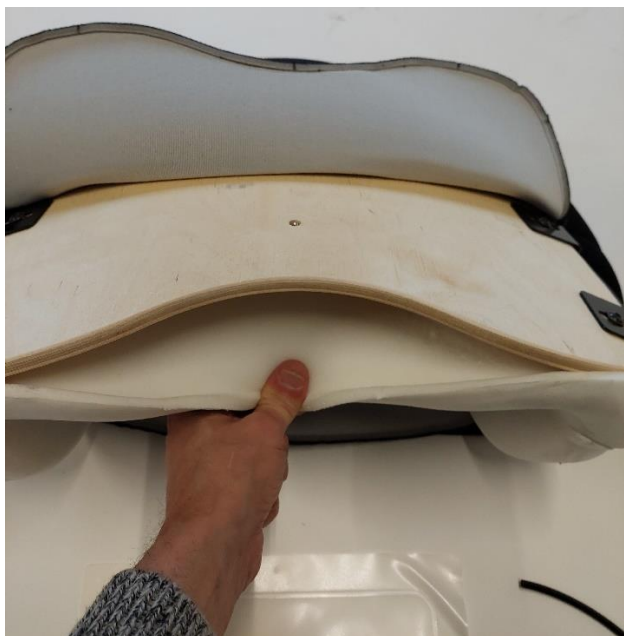

Skummet är endast limmat utmed kanterna och förberett för luftblåsan, Vik ner skummet.



För in luftblåsan vänd så att utgången för slangen kommer på motsatta sidan mot tänkt sida för pumpblåsan så att det blir minsta möjliga





Drag tillbaka klädseln och stäng dragkedjan.

Prova att pumpa upp den och justera tryck samt placering vid behov.