


Jalkatukipuoliskon FSN 104121 vaihto-ohje


Pura jalkatukipuoliskot ja poista vanha kumialuslevy SW-00582.

Seuraavia osia ei käytetä uudelleen: SW-00403, 7MC6S-10*22 OBEH, FBB 10,2x16x2,5

Kun kokoat jalkatukipuoliskoja, käytä alla olevien kuvien mukaisesti 7MC6S-10*22 OBEH, FBB 10,2x16x2,5, aluslevyä FORMA SW-00403 ja kumialuslevyä SW-00582 (kumialuslevy on vain etupuoolella). Käytä vihreää kierrelukitetta (LOXEAL 83-52) kahteen ruuviin 7MC6S-10*22 OBEH. Kiristä ruuvit vääntömomentilla 79 Nm.

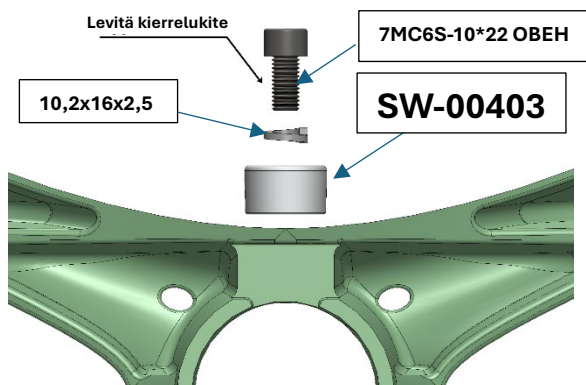

Käytä asennukseen osia MC6S M6x20, aluslevy 6,4x11x1,6 ja SW-01544 (tarkista, että kaikki neljä osaa on kiinni jalkatukipuoliskossa). Levitä sinistä kierrelukitettä (LOXEAL 55-02) ruuviin ja kiristä vääntömomentilla 5–7 Nm.

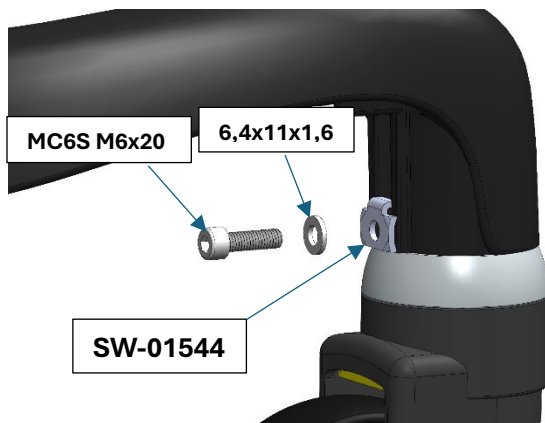

Jalkatukipuoliskon FSN 104121 vaihtaminen(tarkastus
1)