

Instructions relatives au remplacement d'un frein à câble FSN 104121


Outils et matériel :

- **Clé Allen, taille 5**
- **Clé plate, taille 8**
- **Vis de roulettes (MC6S M6x20)**
- **Rondelle de roulettes (6,4x11x1,6)**
- **Attache autobloquante**

Remplacement du frein à câble FSN 104121. (révision 1)


Pré-assemblage :

1. Déposer l'accoudoir et le dossier en entier.
2. Retourner la chaise, sur une table par exemple, pour faciliter le travail.

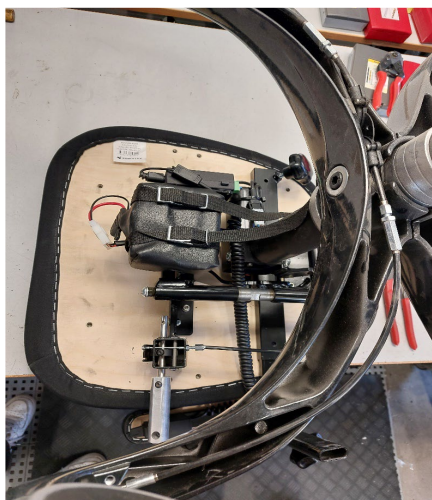


Démontage du frein à câble :

3. Desserrer tout d'abord l'écrou à l'aide d'une clé plate, taille 8.

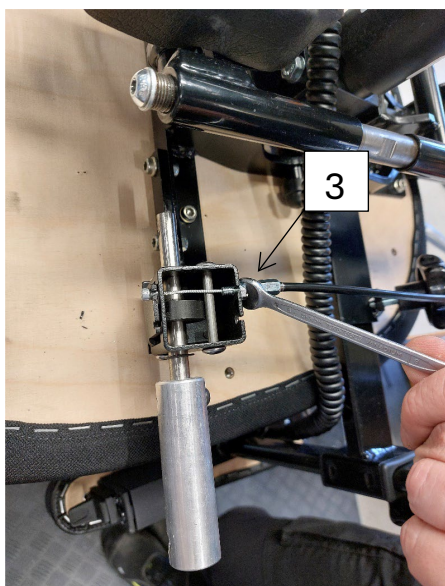


Remplacement du frein à câble FSN 104121. (révision 1)

4. Serrer la vis de réglage jusqu'à ce que le câble se détende.
5. Détacher le câble du support noir.

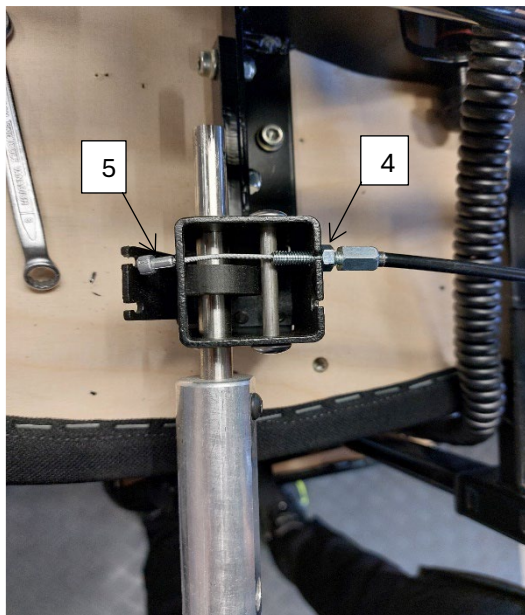


6. Dévisser la vis de réglage et sortir le câble du logement du frein.

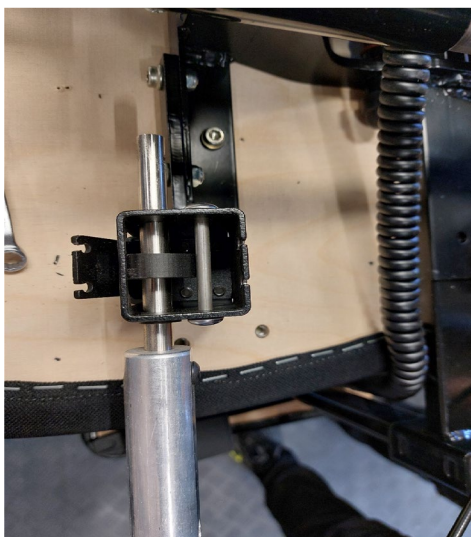


Remplacement du frein à câble FSN 104121. (révision 1)

7. Couper l'attache autobloquante et sortir le câble du châssis.

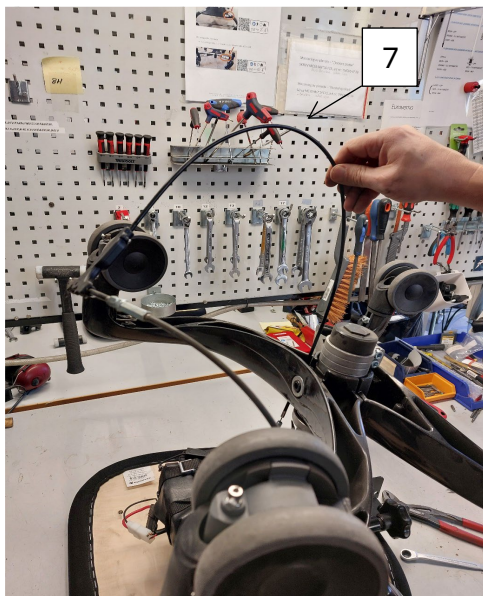


8. Desserrer les roulettes sur le côté de la jambe où se trouve le câble.

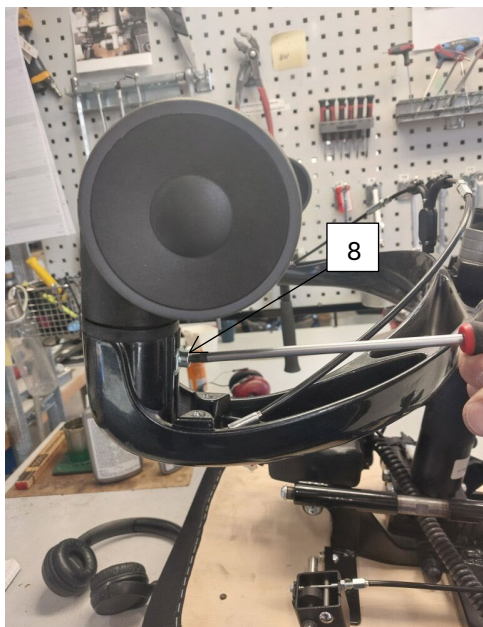

Remplacement du frein à câble FSN 104121. (révision 1)

Installation du nouveau frein à câble

9. Procéder dans l'ordre inverse.
10. Serrer le frein à câble à l'aide d'une nouvelle attache autobloquante. Veiller à ce que le frein à câble soit le plus haut possible.

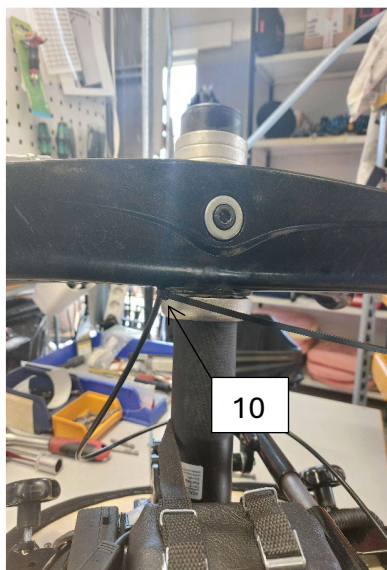

11. Pour tout complément d'information, consulter les instructions : Instructions relatives au remplacement d'une jambe FSN 104121

Remplacement du frein à câble FSN 104121. (révision 1)