

Instructie vervanging kabelrem FSN 104121


Gereedschap en materialen:

- ***Inbussleutel, maat 5***
- ***Ringsleutel, maat 8***
- ***Wielbout (MC6S M6x20)***
- ***Velgring (6,4x11x1,6)***
- ***Kabelbinders***

Vervanging kabelremmen FSN 104121 (revisie 1)


Vóór de installatie:

1. Verwijder de armleuning en hoofdsteun volledig.
2. Draai de stoel om, bijvoorbeeld op een tafel, om het werk gemakkelijker te maken.

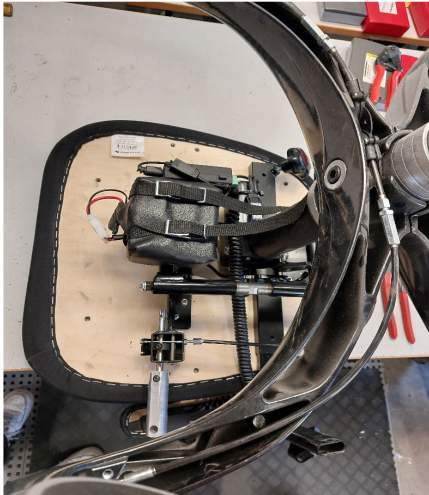


Procedure voor het demonteren van de kabelremmen:

3. Begin met het losdraaien van de moer met behulp van een ringsleutel maat 8.

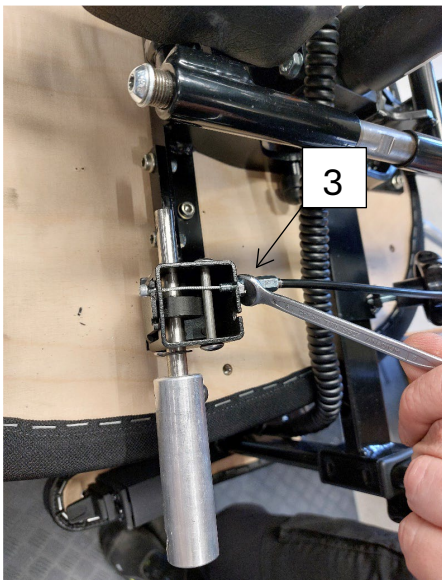


Vervanging kabelremmen FSN 104121. (revisie 1)

4. Draai de stelschroef totdat de kabel loskomt.
5. Verwijder de kabel uit de zwarte bevestiging.

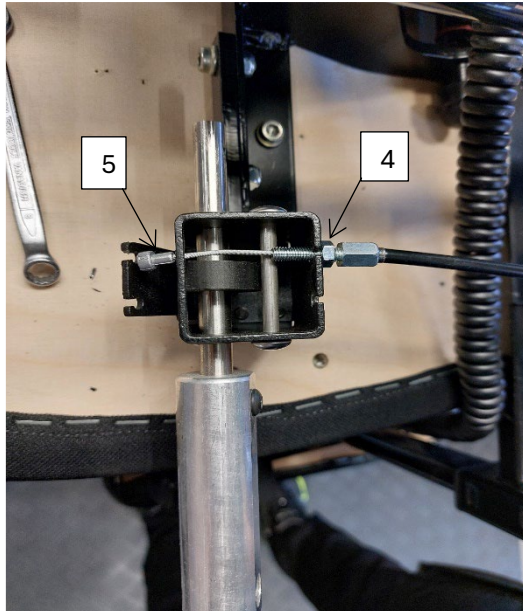


6. Draai de stelschroef los en trek de kabel uit de rembehuizing.

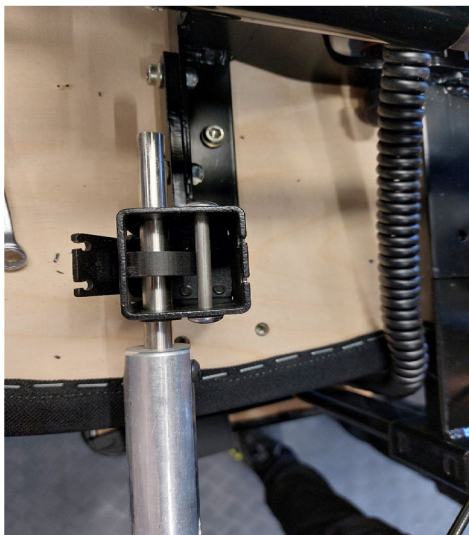


Vervanging kabelremmen FSN 104121. (revisie 1)

7. Knip/snij de kabelbinder door en trek de kabel uit het chassis.

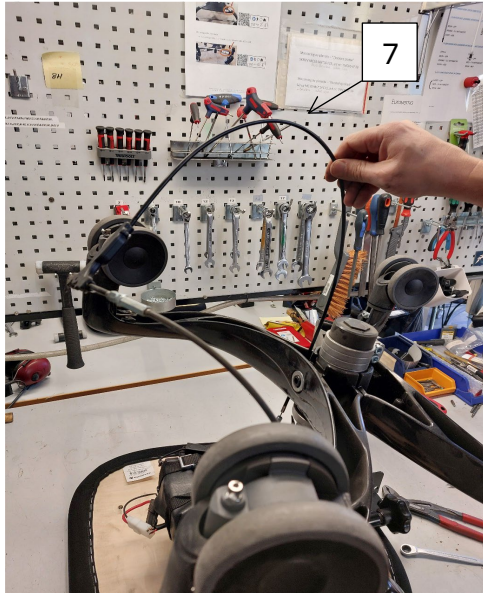


8. Maak de wielen los aan de kant van de beenhelft waar de kabel zich bevindt.

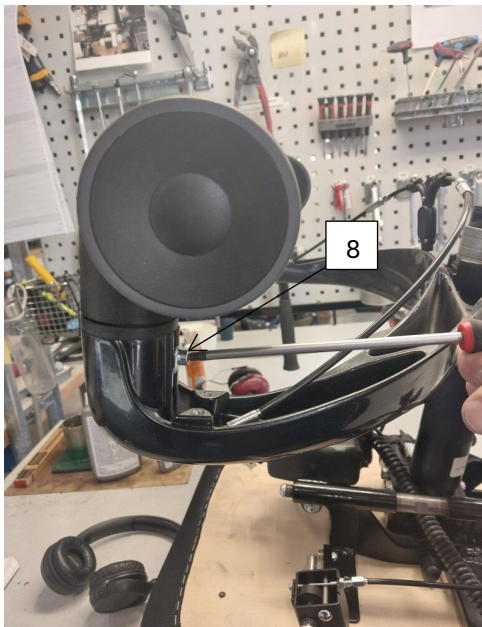

Vervanging kabel- remmen FSN 104121. (revisie 1)

Installatie van nieuwe kabelremmen

9. Herhaal de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde
10. Zet de kabelrem vast met een nieuwe kabelbinder. Zorg ervoor dat de kabelrem zo hoog mogelijk wordt geplaatst.

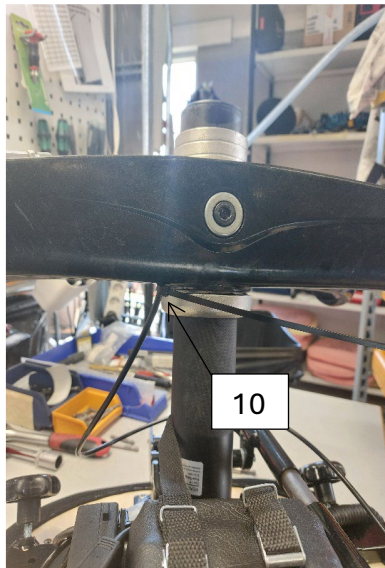

11. Raadpleeg de volgende instructie voor meer informatie: Instructie vervanging beenhelften FSN 104121

Vervanging kabelremmen FSN 104121. (revisie 1)