


Instruktion för Byte av benhalva FSN 104121


Demontera benhalvorna och ta bort den gamla gummibrickan SW-00582.

Följande delar återanvänds ej :SW-00403, 7MC6S-10*22 OBEH, FBB 10,2x16x2,5

När du monterar ihop benhalvorna, använd 7MC6S-10*22 OBEH, FBB 10,2x16x2,5, Bricka FORMA SW-00403 och Gummibricka SW-00582 (Gummibricka finns enbart på framsidan) enligt bilderna nedan. Applicera grön locktite på (LOXEAL 83-52) på de två 7MC6S-10*22 OBEH. Dra åt skruven med ett åtdragningsmoment på 79 Nm.

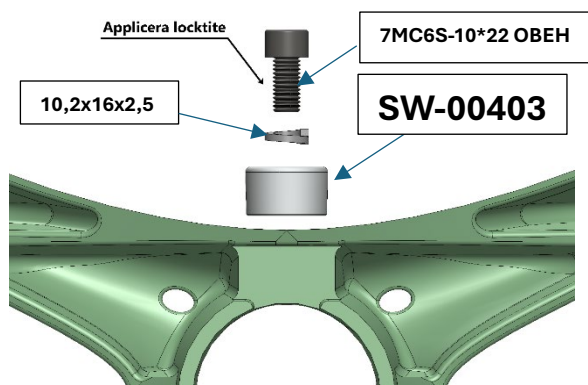

Använd komponenterna för montering, MC6S M6x20, Bricka 6,4x11x1,6 och SW-01544 (Kontrollera att alla fyra taggar fäster på benhalvan). Applicera blå locktite (LOXEAL 55-02) på skruven och dra åt den med ett åtdragningsmoment på 5-7 Nm.

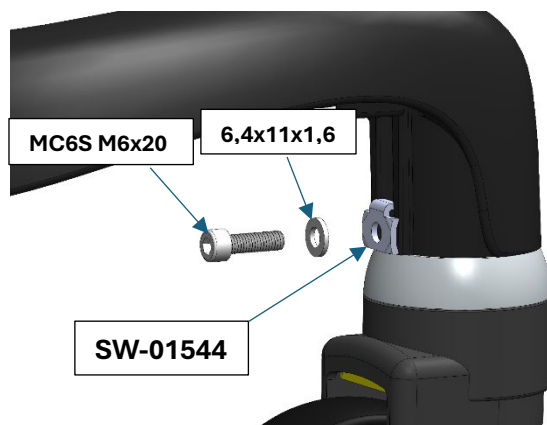

Byte av benhalvaFSN 104121(revision 1)