


MONTERINGSANVISNING

4-punkts sele SitRite







Lossa täcklocket från aluminiumprofilen.

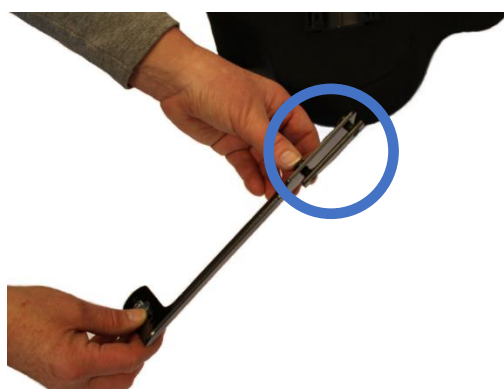

Lossa skruvarna några varv.

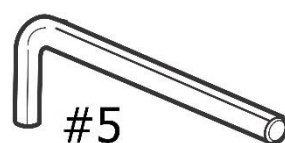

För ner fästet i aluminiumskenan.

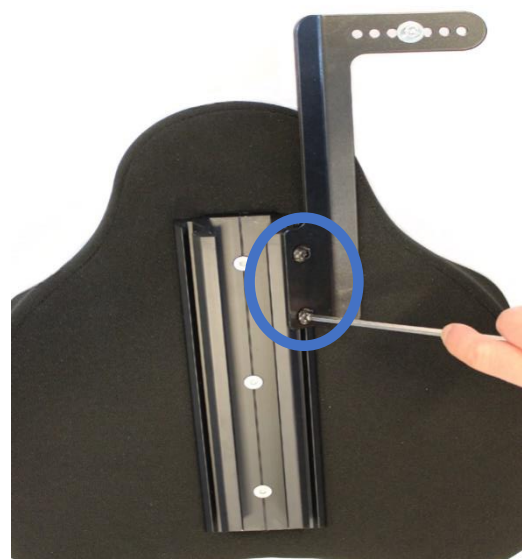

Dra åt skruvarna ordentligt, montera fästet på andra sidan.






Justera så att fästena sitter i samma höjd och dra åt skruvarna.




Lossa skruvarna några varv. För in fästet i skenan underifrån.

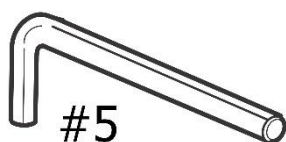

Montera fästet på andra sidan och justera dom sitter i jämnhöjd. Dra åt skruvarna ordentligt.




Montera selens två övre bandspänne med hjälp av medföljande fästdetaljer. Välj det hål som passar bäst för användaren.

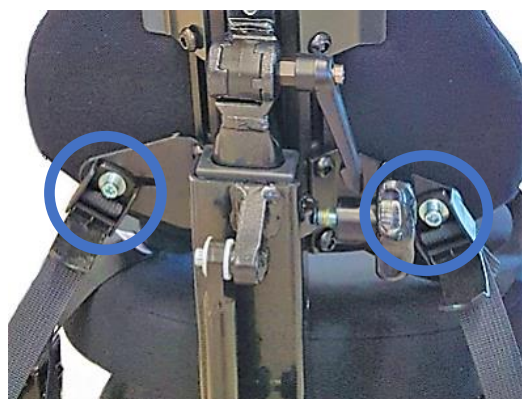

Montera selens nedre bandspännen med medföljande fästdetaljer. Justera bredden för att passa för användaren och dra åt skruvarna



Ställ in höjden på selens övre fästen så att den passar för användaren. Dra åt skruvarna ordentligt.

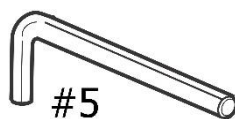

[illegible]



Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se