

MONTERINGSANVISNING

Slingback på Basic kryss






Lossa mutterskydden på båda sidorna.




Lossa och ta bort muttrarna.

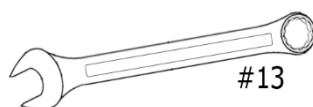


#13



Tag bort pinnbulten.

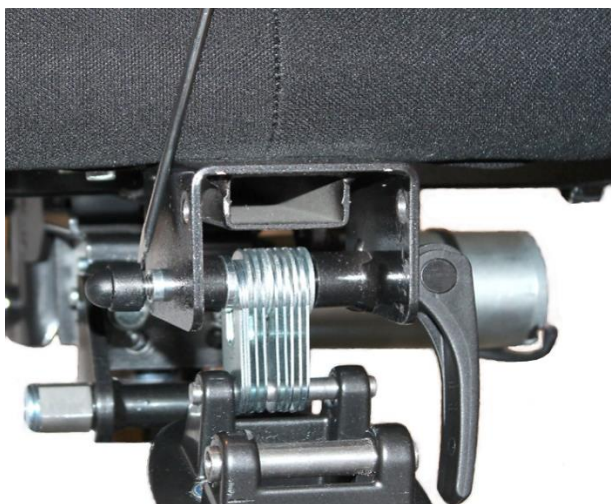


Fäll ned rygginfästningen.

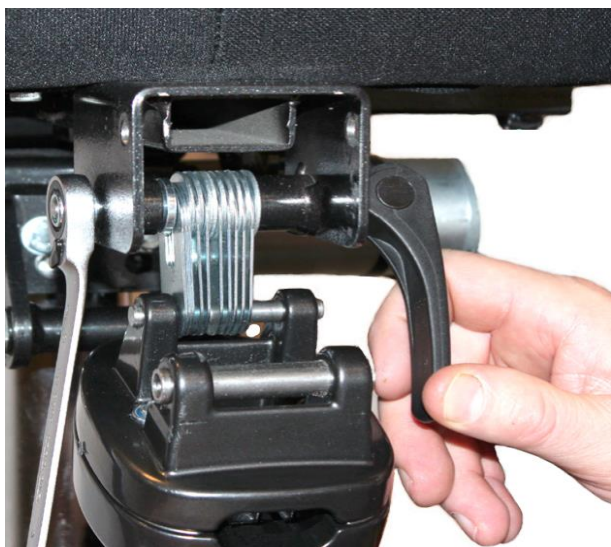


Lossa muttern med fastnyckel.



Håll lamellpaket med ett fast grepp.

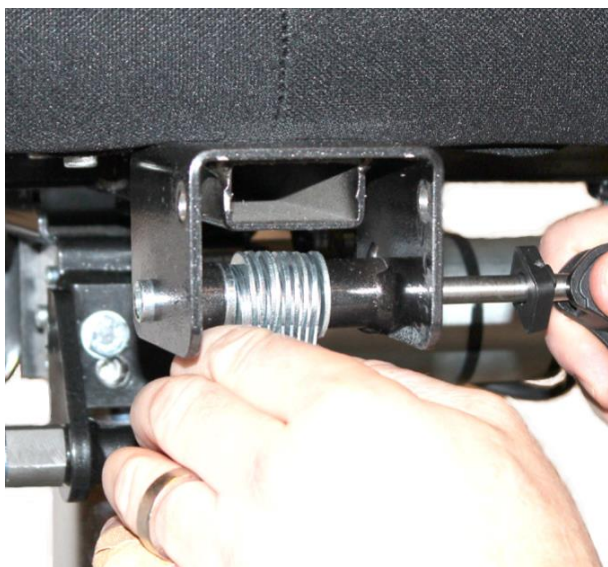

Drag ut pinnbulten.

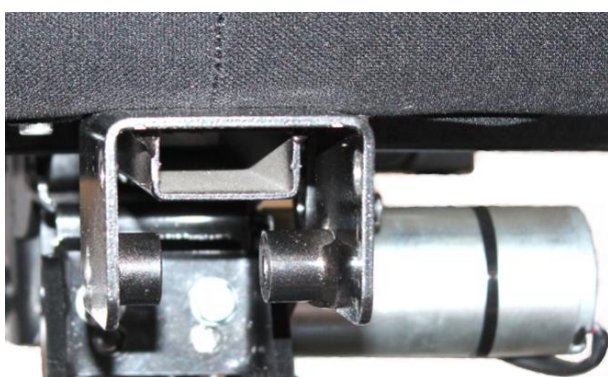

När du dragit ut pinnbulten ur rygginfästningen, sätt tillbaka pinn-bulten i lamellpaketet så att inte alla brickor loss nar.



Sätt dit nedre ryggbågen i sittkrysset.



Sätt dit förstyvningsjärnet.



Sätt dit den längre skruven med metall
brickan med förstyvningsplåten på insidan
och fäst med muttern.







Skruva dit den kortare skruven med bricka i det bakre hålet. Sätt dit brickan och muttern på andra sidan av förstärkningsjärnet.



Sätt dit skruv och bricka med mutter och bricka på andra sidan i rygginfästningen.



Dra åt skruvarna ordentligt.

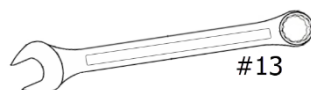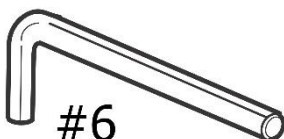




Sätt dit slingbackryggen i nedre ryggbågen.



När ryggen är inställd i rätt höjd, dra åt skruvarna ordentligt på båda sidorna.

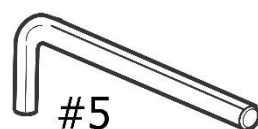



För att justera vinkeln på slingbackryggen, lossa skruven och ställ in önskad vinkel, dra åt skruven ordentligt.

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se