


Monteringsanvisning
Bromsspak
Justering/byte av sida



Justering bromsspak

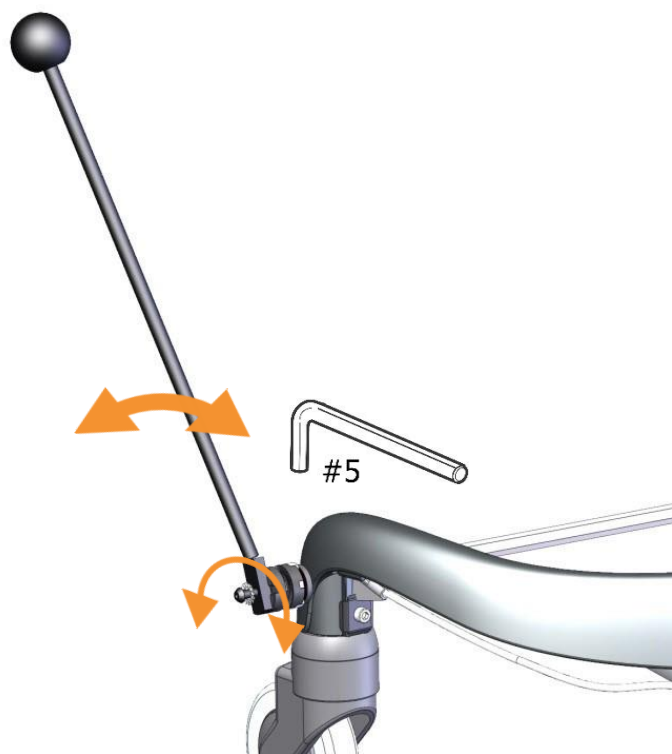

Justera Bromsspakens vinkel.

1. Lossa skruven vid spakens infästningspunkt med insexnyckel 5mm, lossa endast skruven något varv så att det går att ändra vinkeln på spaken.
2. Dra åt skruven ordentligt efter slutförd justering
3. Provbromsa stolen för kontroll av läge och att den sitter fast ordentligt.



Flytta bromsspak till andra sidan.

1. Lossa skruven helt.
2. Ta alla delar från bromsstången.
3. Lossa skruven och brickorna på den sida som spaken ska monteras på och montera dem på andra sidan där spaken tidigare var monterad.
4. Montera spaken på nya sidan.
5. Justera spakens vinkel och drag åt skruven.

