

MONTERINGSANVISNING

Bromsspak ställbar



Ställbar Bromsspak



Bromsspaken är ställbar i bredd, vinkel och höjd och passar alla Euroflex arbetsstolar.



Montering neder fäste Flexbase och Sigma





Montera nedrefästet med gummipackning innerst följt av plastbricka, medbringaren, kugglås och fästet. Vänta med att dra åt slutligt tills spakens vinkel är inställd.

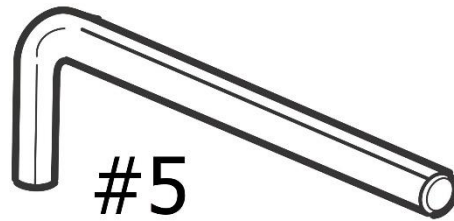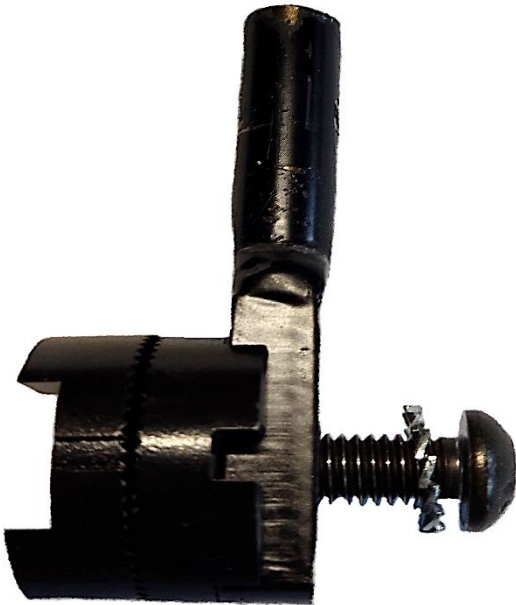

Montering nedre fäste Basic, Junior och HiLo




Montera fästet på bromsstången med kugglåsen.
Vänta med att dra åt slutligt tills spakens vinkel
är inställd.

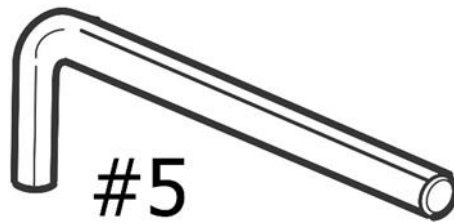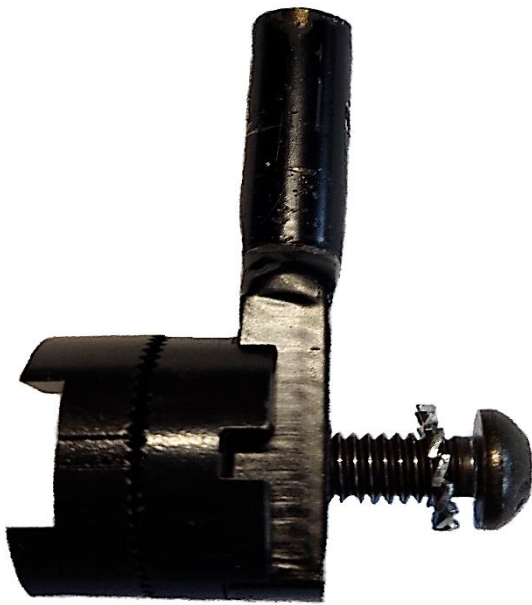

Montering och inställning av bredd och vinkel



Montera bromsspaken på fästet. Justera spakens läge i sidled. Dra åt skruven ordentligt.

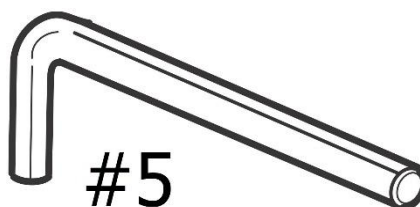


Justera spakens placering i vinkel framåt/bakåt. Dra åt skruven ordentligt



Inställning av höjd



Spakens höjd är justerbar steglöst 42-50 cm i det övre skruvhålet (1), 48-58 cm i det nedre skruvhålet (2).

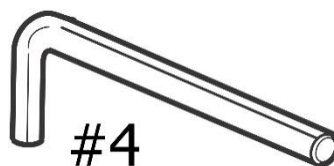

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se