


Monteringsanvisning

Central bromsat enkelhjul



Montering Centralbromsat hjul

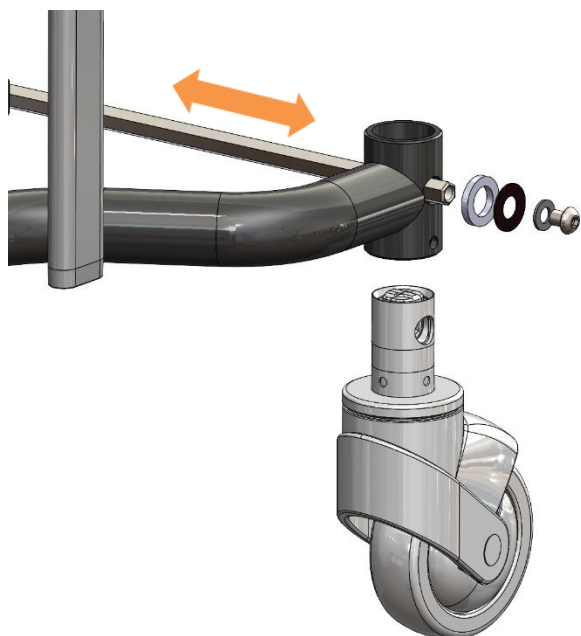

Demontering / montering

För bromsspaken till o-bromsat läge.
Lossa skruven med insexnyckel nr. 5

drag av plastbrickan och gummipackningen
från sexkantsstången.

Drag ut bromsstången så långt att det går att
dra ut hjulet.

Skruva ur M6 skruven som låser hjulets
gaffeltapp i chassit och drag ur hjulet.

Montering sker i omvänd ordning, observera
att hjulet ska vara i obromsat läge och att det
är i rätt läge när sexkantsstången förs tillbaka
genom hjulet. Detta kontrolleras genom att
hålla hjulet i läge så att hålet för stången
stämmer överens, sätt det på sexkantsstången
och bromsa med spaken, hjulet ska då vara
bromsat, om ej vrid gaffeltappen 180°

Montera tillbaka skruven med bricka. Prova
bromsarna efter avslutad montering.

