

MONTERINGSANVISNING

Fäste 4-punkts sele SitRite







Lossa täcklocket från aluminiumprofilen.



Lossa skruvarna några varv.

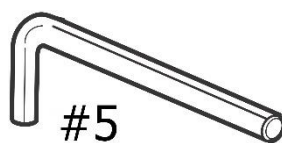

För ner fästet i aluminiumskenan.

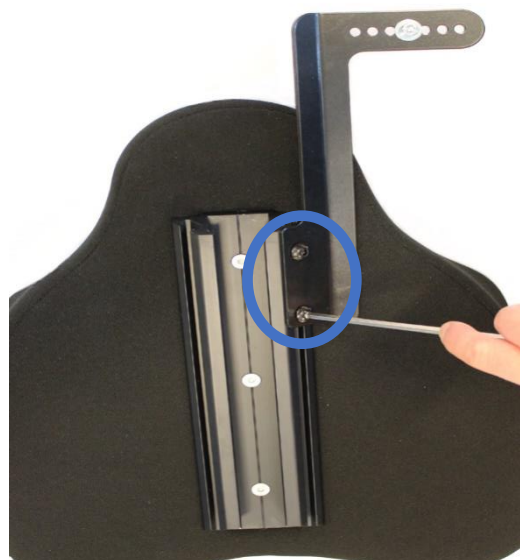

Dra åt skruvarna ordentligt, montera fästet på andra sidan.






Justera så att fästena sitter i samma höjd och dra åt skruvarna.



Lossa skruvarna några varv. För in fästet i skenan underifrån.

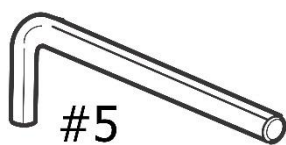

Montera fästet på andra sidan och justera dom sitter i jämnhöjd. Dra åt skruvarna ordentligt.



Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se