


MONTERINGSANVISNING

Fotbromspedal





Lossa och ta bort skruven och brickorna.

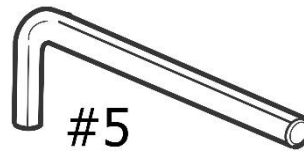


Dra ur sexkantstången.



Trä på fotbromspedalen på sexkantstången och för tillbaka sexkantstången genom hjulet. Montera tillbaka brickorna och skruven, se bild (1)



Justera pedalens placering på sexkantstången till önskat läge. Lås fast pedalen med stoppskruvarna.

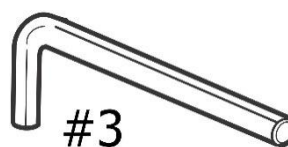

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se