

MONTERINGSANVISNING

Främre fäste 4-punktsbälte





SW-020225



7K6S-6x14


7F6S-6x20

7MC6S-6x16-LOCK


7BRB-6,4x12

7NB-6x16


7LOCK-M6L

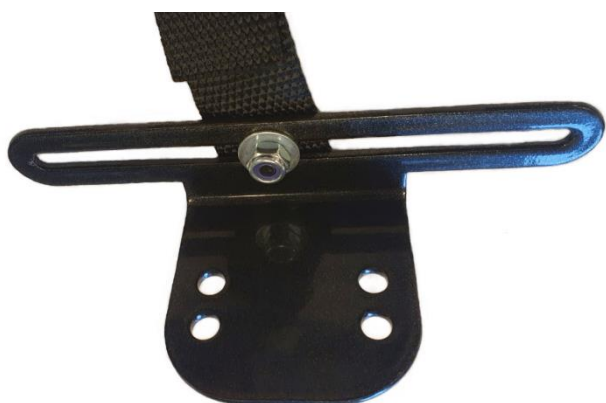

Bältet monteras i fästet med kullrig skruv, nitbricka, planbricka och låsmutter.

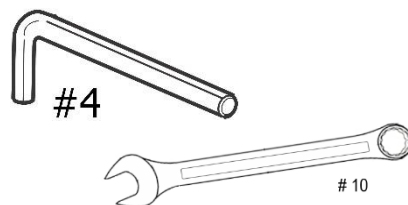

Fästet monteras i sitsen med två skruvar 7MC6S-6x16 förbehandlade med gänglim.

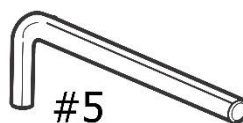

Bältesfäste i kombination med sidostödsfäste monteras med försänkta skruvar 7F6S-6x20



Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se