



MONTERINGSANVISNING

Kombifäste



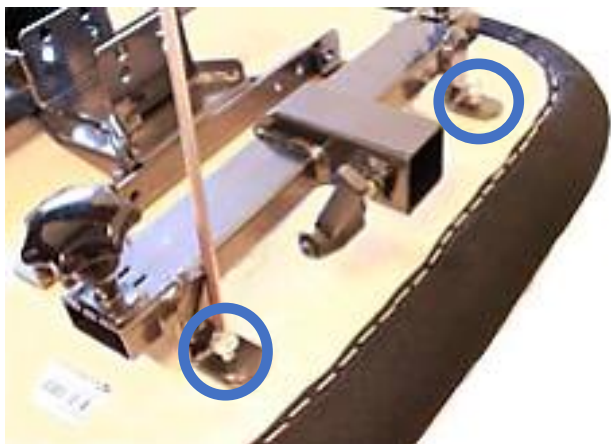

Kombifästet monteras i sitsen med två M6x16 förbehandlade med gänglim.

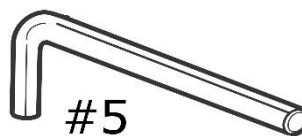



Montera ihop kombifästet med sittkrysset med två M6 skruvar.



Skruva dit låsmutter.



Dra åt skruvarna ordentligt.

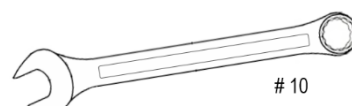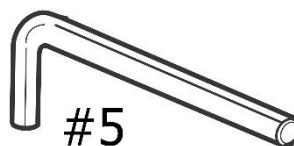

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se