


MONTERINGSANVISNING

Sidostöd/Lårstöd



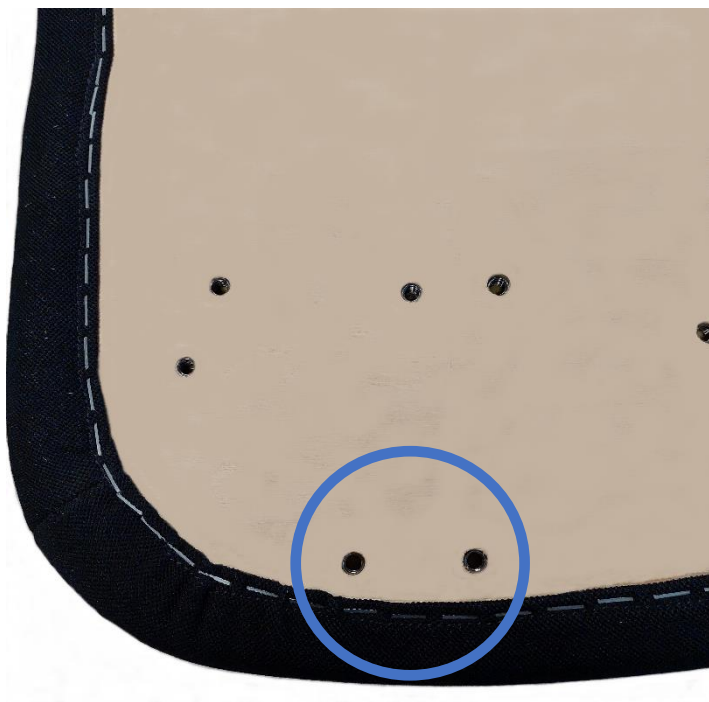


Sitsen är förberedd två hål med gängade islagsmuttrar på vardera sida.



Välj dom två hålen i fästet som passar bäst till vald sits. Skruva fast fästet med medföljande försänkta skruvar.



Lossa skruven (1) och montera sidostödet i fästet. Ställ in önskad höjd, lossa skruven (2) ställ in vinkeln på dynan. Dra åt båda skruvarna ordentligt.

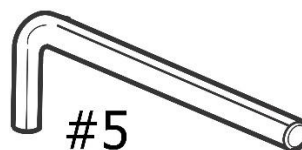

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se