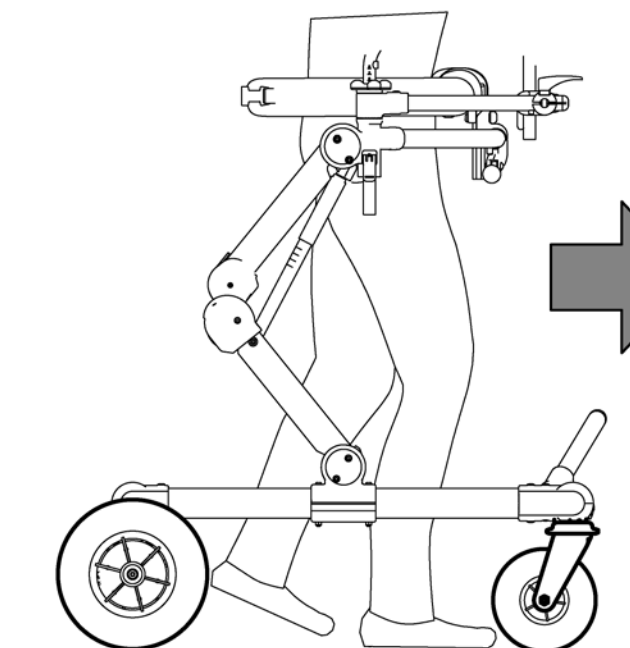
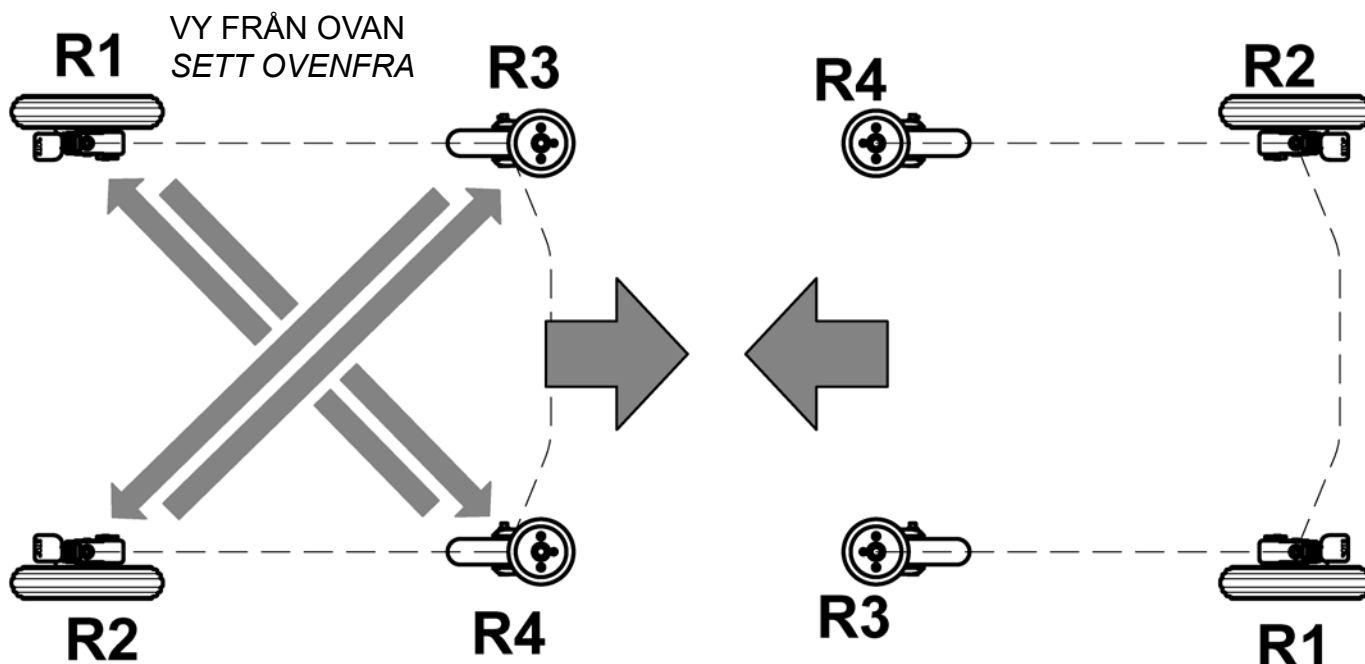
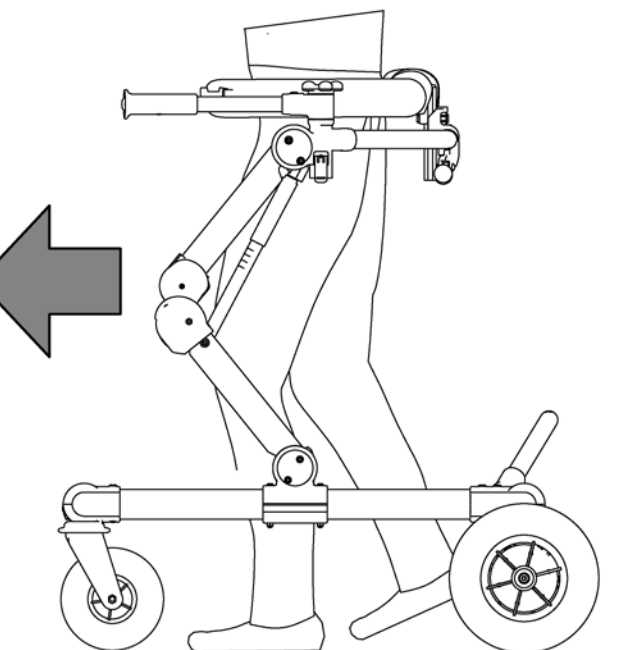
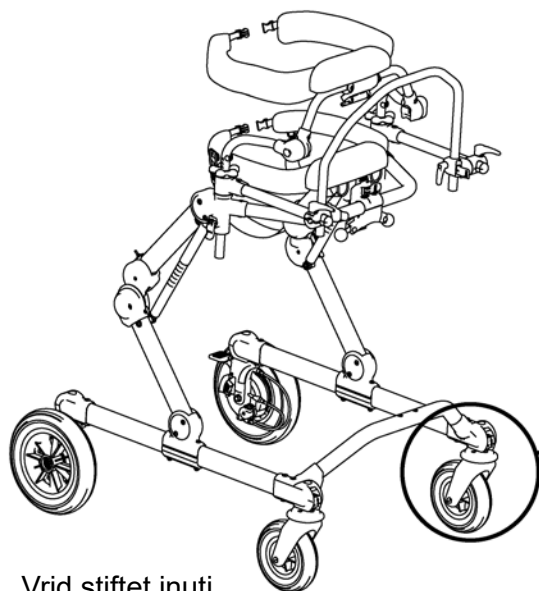


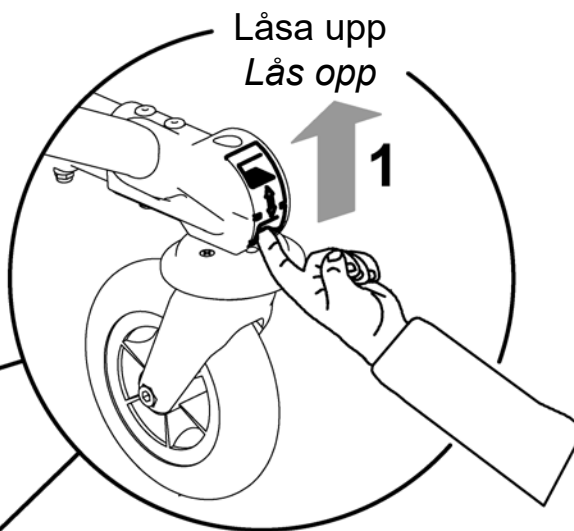
OBSERVERA! Detta moment ska utföras av kvalificerad personal.**ADVARSLER!** Denne operasjonen må kun utføres av kvalifisert personell**A** SCHEMA FÖR MONTERING OCH DEMONTERING AV HJUL
HJULMONTERINGS- OG DEMONTERINGSSKJEMAGRILLO STÄNGD FRAM
GRILLO MED LUKKET FRONTGRILLO ÖPPEN FRAM
GRILLO MED ÅPEN FRONT

**B DEMONTERING AV HJUL PÅ GRILLO
STÄNGD FRAM/LUKKET FRAM**DEMONTERING AV LÄNKHJUL
DEMONTERING AV SVINGBARE HJUL

Vrid stiftet inuti
riktningslåset fyra varv
medurs med nyckeln.

Vri settskruen i
retningslåsen 4
omdreininger med
skiftenøkkelen i retning
med urviseren.

Nyckel
Skiftenøkkel

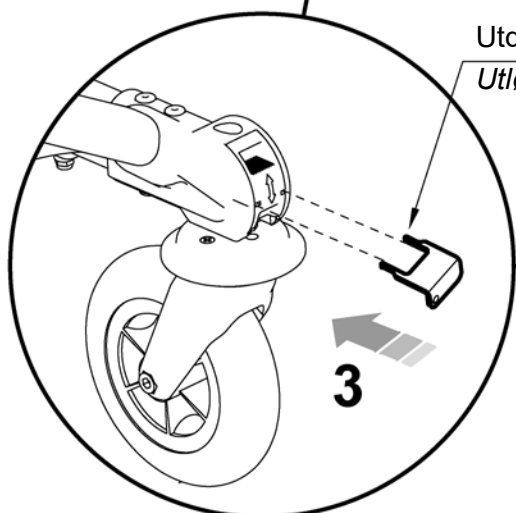
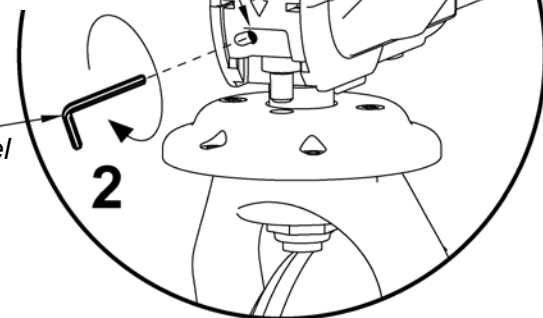
2

Låsa upp
Lås opp

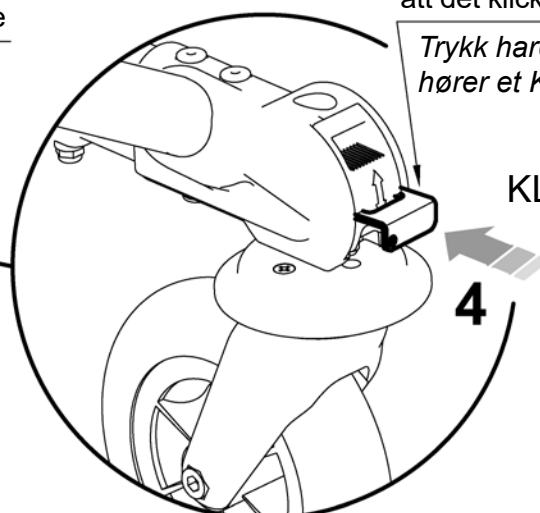
1

Stiftet måste vara fullständigt
iskruvat i hjulfästet för att
kunna dra ut riktninglåset.

For å trekke retningslåsen
ut, må settskruen være helt
skrudd inn i hjulholderen.



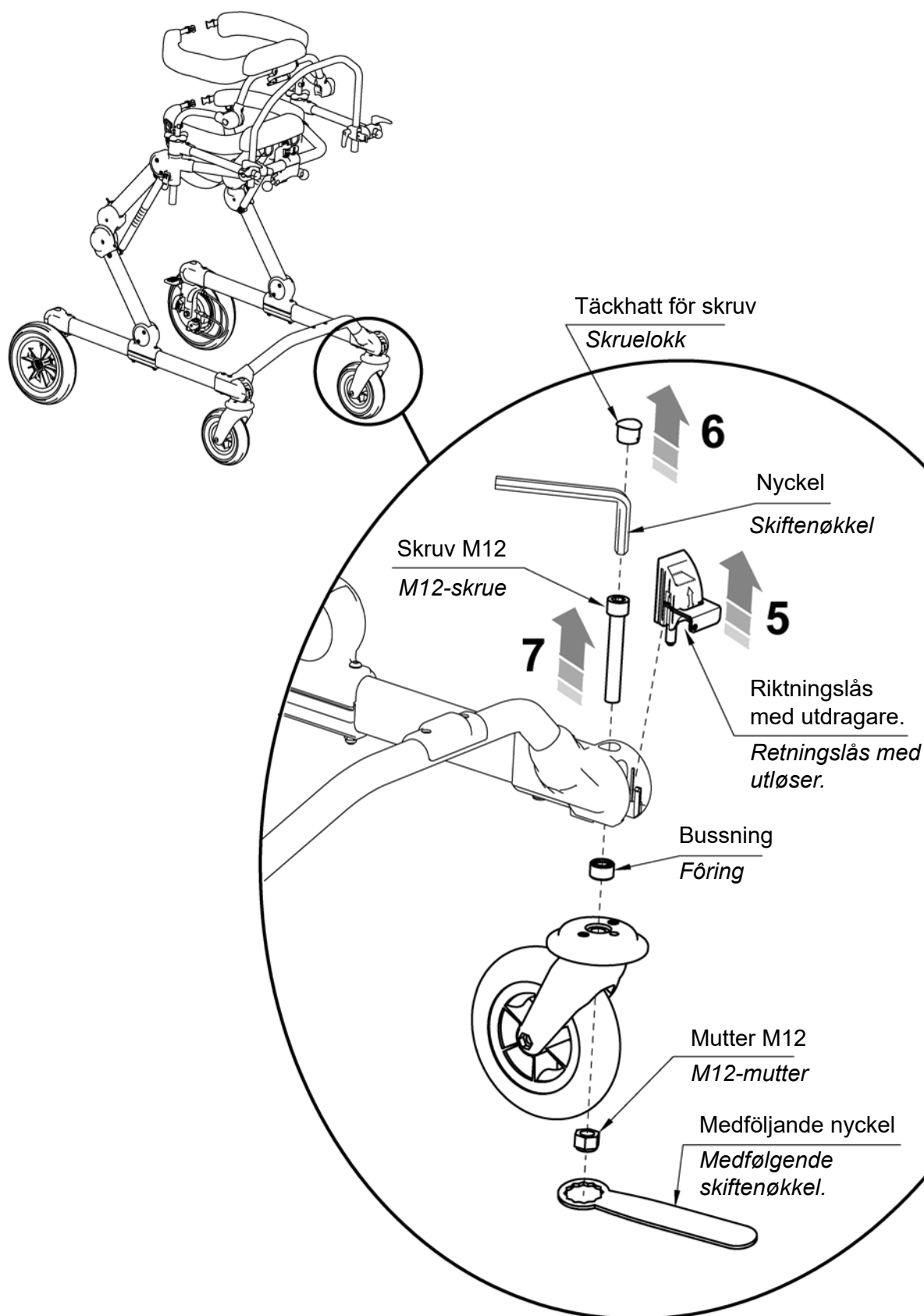
Utdragare
Utløser

3

Tryck hårt tills du hör
att det klickar till.

Trykk hardt til du
hører et KLIKK.

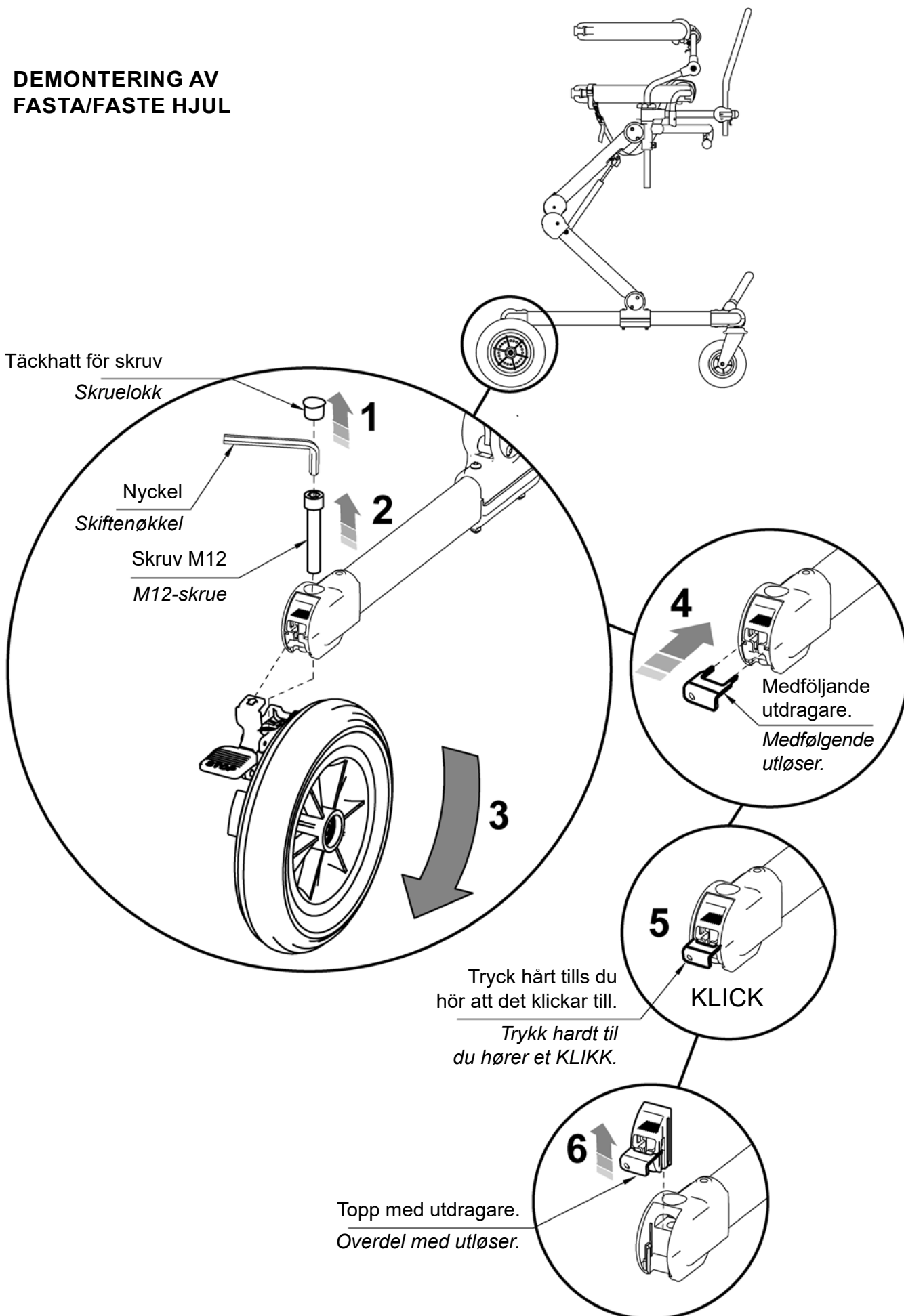
KLIKK**4**

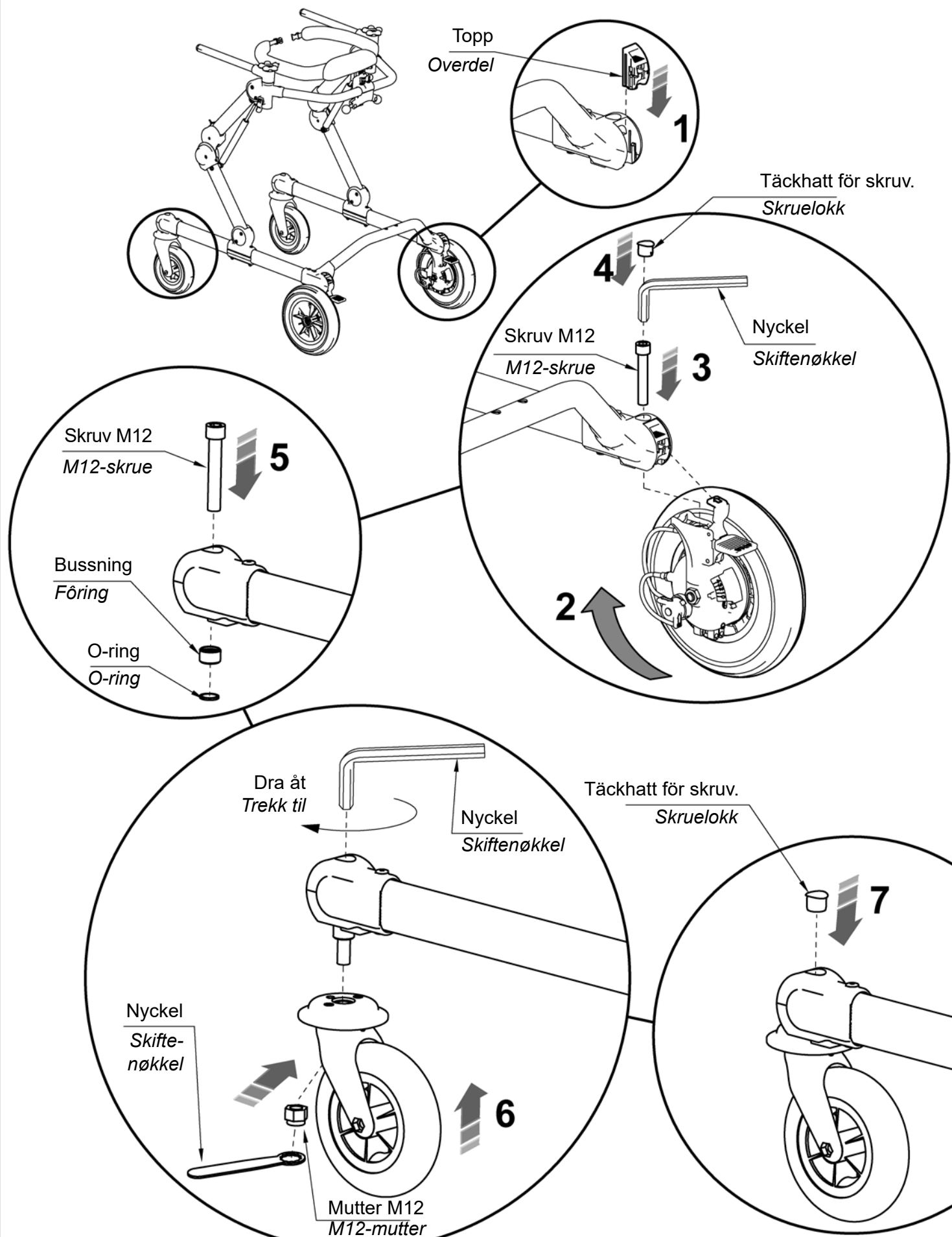


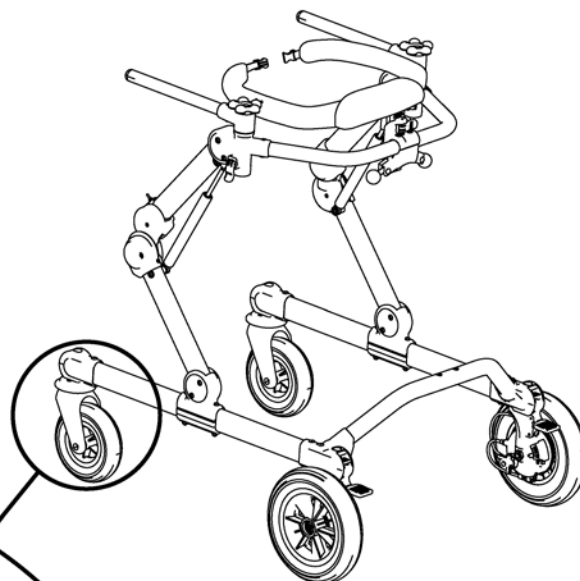
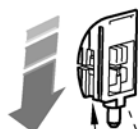
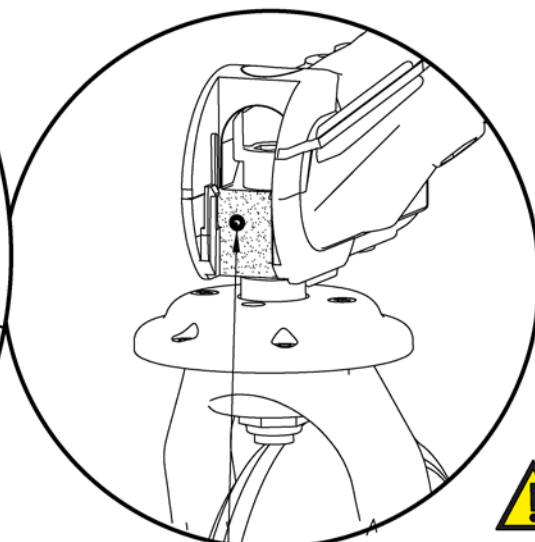
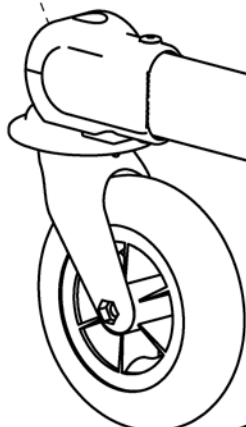
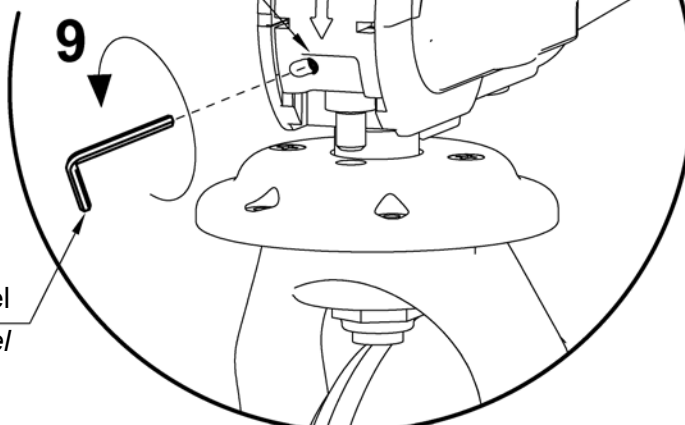
**DEMONTERING AV
FASTA/FASTE HJUL**

Täckhatt för skruv

Skruelokk

Nyckel
SkiftenøkkelSkruv M12
M12-skrueTryck hårt tills du
hör att det klickar till.Trykk hardt til
du hører et KLIKK.Topp med utdragare.
Overdel med utløser.

C MONTERING AV HJUL PÅ GRILLO ÖPPEN FRAM/ÅPEN FRONT

**8**Riktningslås
RetningslåsSätt i riktningslåset
utan att aktivera det.
Sett inn retningslåsen
uten å aktivere den.Stiftet måste vara
fullständigt iskruvat i
hjulfästet för att kunna
sätta i riktningslåset.Vrid stiftet inuti riktningslåset
fyra varv moturs med nyckeln.Vri settskruen i retningslåsen 4
omdreininger med unbrakonøkkelen
i retning mot urviseren.**9**Nyckel
SkiftenøkkelFor å sette retningslåsen
inn, må settskruen
være helt skrudd inn i
hjulholderen.

D ROTERING AV HANDTAG/HÅNDTAK